

商品取り扱い説明書

ご使用前に必ずお読みください

軽量サスペンションクラッチ「楽^{らく}らっち」

AIJ-182S サスペンション内蔵の松葉杖。 より優しく、より楽に次の一歩を。

使う人にとってよりやさしく、また疲労も軽減させるサスペンション付松葉杖です。
ショック吸収はもちろん、サスペンションの反発力が歩行時には推進力となり、少ない力でより早く次の一歩へ移れます。
脇パッドや握り部はラテックスフリー材料のため、ゴムアレルギーの方も安心してご使用いただけます。

仕 様

	S	M	L
適応身長	135~155cm	155~180cm	180~205cm
クラッチサイズ	97~117cm	117~137cm	137~157cm
重量(1本)	800g	850g	900g
耐荷重	120kg		
材質	本体：アルミ(シルバーアルマイト仕上げ)		

高さ・握り位置の調整

ご使用になる前に必ず下記の調整を行い、正しくセットされたことを確認してください。

1. 高さ調整

肩の力を抜いた状態で立ち、松葉杖を脇へ垂直にあて、パッドが脇にあたらない程度の高さになるよう調整してください。方法は、脚高調整ボタンを指で押し、脚部を上下させることにより9段階に調整することが出来ます。調整の際、ボタンに指を挟まないよう注意してください。


2. 握り位置調整

握ったとき軽くひじが曲がる位置としてください。調整は5段階可能で、手で蝶ナットをゆるめ固定ボルトをぬき位置決めを行なった後、再びボルトと蝶ナットでゆるみがないよう確実に固定してください。

⚠ 使用上の注意も必ずお読みください

松葉杖使用上の注意

- ① 脚部にはサスペンションが内蔵されているため、決して分解しないでください。またサスペンション部への注油は行わないでください。油が流れ出て、使用時に滑る原因となりたいへん危険です。
- ② 松葉杖の使用に当ってはボルトの蝶ナットが緩んでいないか確認してから使用してください。もし緩んでいる場合は確実に締めてから使用してください。
- ③ 松葉杖の寸法を調整する場合、部品をなくさないよう注意してください。
- ④ 松葉杖に先ゴムを確実に装着して使用してください。
先ゴムが摩耗した場合や、亀裂などが見つかった場合は、正しいサイズの新しい先ゴムと交換してください。
先ゴムには油などがつかないようにしてください。油などの付着が見つかった場合は、必ず拭き取ってから使用してください。そのままにしますと滑って転倒する恐れがありたいへん危険です。
- ⑤ 濡れて滑りやすい路面や床面を歩行する場合は充分注意してください。
- ⑥ 松葉杖の寸法が使用される方の体型に対し正しく調整されないと、正しい歩行が出来なくなります。
医師や専門アドバイザーの方に、松葉杖を使用した正しい歩行方法を指導して頂いてください。
- ⑦ 松葉杖本体に亀裂、破損、損耗等が見つかった場合は使用を中止してください。

発売元  株式会社 インタージェット AIJ福祉事業部

大阪市淀川区西宮原2丁目7-38

製品原産国 中国

1703.03