

愛乗ストリームのご使用にあたって

～ より快適にお使いいただくために ～

車体の折りたたみ方

折りたたみベルトを上げると簡単に車体を折りたためます

上げの際は、前方に向かって右側を上げてください

* 製品の機構上、ベルトの真ん中より右側が上げやすくなっています。

バッグの取外し方/取付け方

取付け金具をスライドすることでバッグを取り外せます

取付けは逆の手順で行なって下さい

その際に車体を少し折りたたむ事でスムーズに取り外せます

背もたれの取外し方/取付け方

背もたれ部ピンを外側から押出すことで背もたれを取り外せます

取付けは逆の手順で行なって下さい

杖ホルダの取付け

杖ホルダは左右どちらがわでも装着する事ができます。

メンテナンスにつきて

天然ゴムは使用していないためオゾン殺菌は問題ありませんが、水の使用はお控え下さい

*使用している鉄製のネジ、ワッシャー、ナット類に錆が発生し、シートやバッグ生地へ染み込む可能性があります

