

# 【楽らくハンド】のご使用にあたって

“楽らく”生活を実現するために

## < 使用開始にあたって >

初回はハサミ部を軽く手で広げるようにして下さい。

～ 梱包時はハサミ部（先端部分）にキャップをはめてあります。

先端のゴムキャップを取り外してから、御使用ください。宜しくお願いします。



## < ご使用にあたって >

レバーに（両手できつく握るなど）必要以上の力を加えないで下さい。

～ 楽らくハンドは必要以上の力を加える必要なく、作動します。

ハサミ部に体重をかけないようにして下さい

～ 杖ではありませんので体重をかけることはできません。 特にご注意ください。

ものを引っ掛ける際にはハサミ部を閉じて揃えた状態で使用して下さい。

～ ハサミ部が開く方向に強い力が加わると破損する恐れがあります。

1kg以上のものを持ち上げるためのご使用はおやめ下さい。

水中でのご使用は避けて下さい。

～ ハサミ部のゴムはがれや金属（バネなど）の錆つきの原因となります。

## < 保管にあたって >

汚れの除去には中性洗剤を使用して下さい。

高温多湿な場所での保管を避けて下さい。

分解・改造などをなさらないで下さい



\* 万が一故障の際にはお買い上げいただきました販売店様までご連絡をお願い致します。