


【 楽しくハンド 組立方法 】 ページ 1

<全体図>



<分解図>

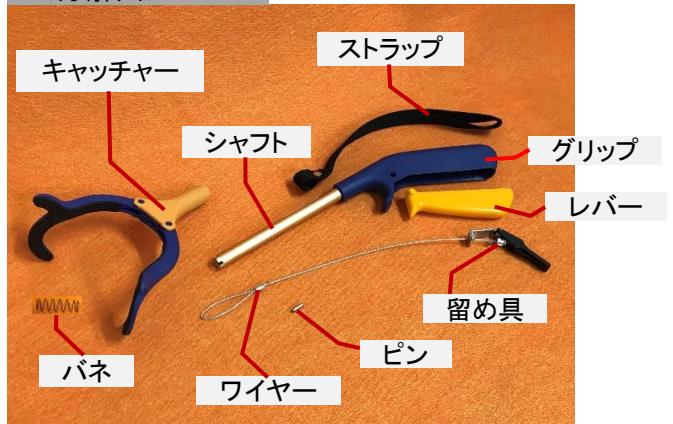

①



キャッチャーの先端部分からピンが外れて分解している状態です。(グリップを握ってもキャッチャーが動かない状態) ピン、バネを紛失していないか確認してください。

④



グリップから留め具を外すと、ワイヤーは緩みます。固定していたピンを抜き、本体部分よりキャッチャーを取り外してください。

②



レバーの突起部分を近くを押しながら、グリップから外す。片方ずつ外せばよりスムーズにレバーの取り外しができます。

⑤



キャッチャーの内部にバネが入っているか確認し、一旦バネを外してください。

③




レバーを外した後、ワイヤーに付いている留め具部分をグリップから外してください。

⑥



ワイヤーをキャッチャーの中に通しながら、本体(シャフト)にキャッチャーを取り付けます。


【 楽しくハンド 組立方法 】 ページ 2

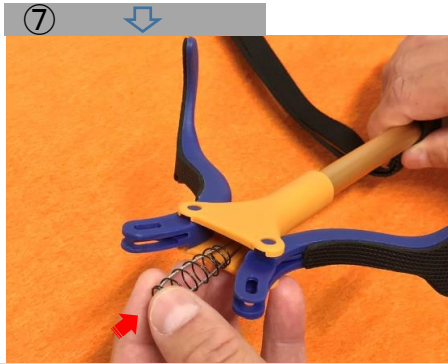

パネの内側にワイヤーを通すように、パネをキャッチャーの内部に取り付けてください。



パネをキャッチャー内部に取り付けた状態です。

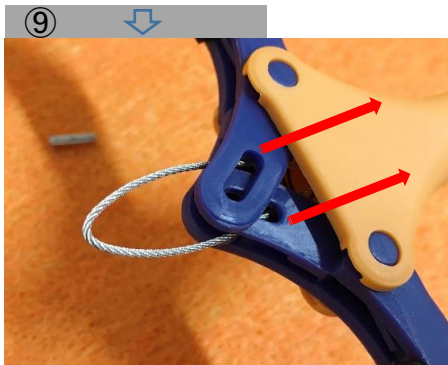

ワイヤーがキャッチャー先端部の中に入るように先端部を閉じていきます。




ワイヤーを真ん中の隙間位置にセットします。


ワイヤーが正しくキャッチャー先端部に入っている状態です。




キャッチャーの穴とワイヤー先端の輪を通すようにピンを差し込みます。

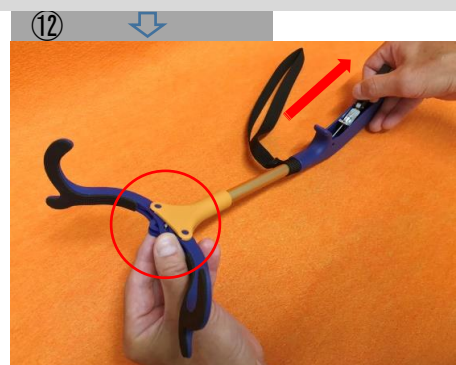

ピンが落ちないように指で押さえながら、ワイヤー留め具を引っ張ります。

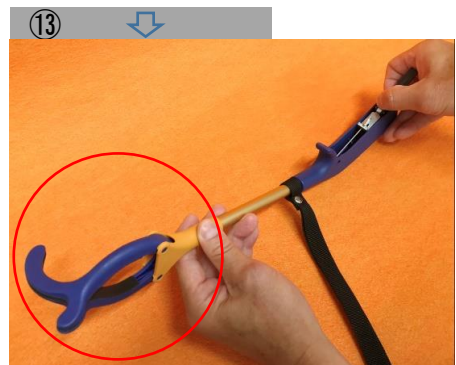

ワイヤーを引っ張っている状態です。ピンが正しく取り付けられていれば、キャッチャーが閉じます。

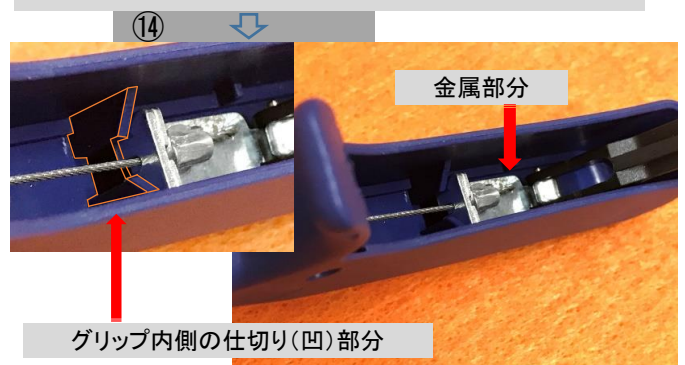

金属部分


グリップ内側の仕切り(凹)部分

ワイヤーを引いたまま、グリップ内側の仕切り(凹)部分に留め具の金属部分(銀)を引っ掛けるようにセットします。


【 楽しくハンド 組立方法 】 ページ 3



留め具の樹脂部分(黒)をL字に立てた状態で、先の部分をレバーの仕切り(凹)部分にあてる。

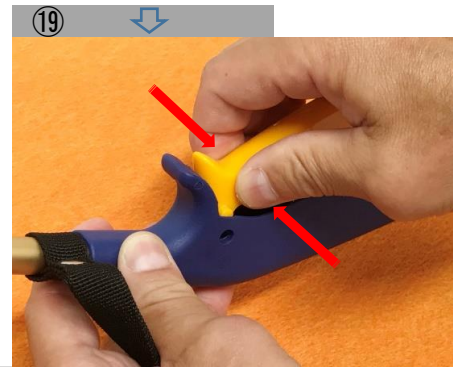


レバーの突起部分(凸)の近くを押さえるようにして、レバーをグリップにはめこみます。

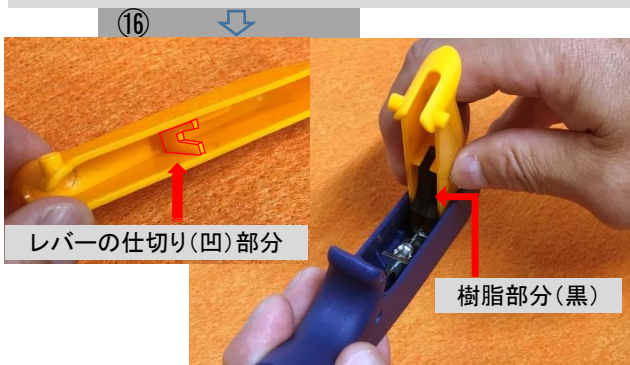

留め具の樹脂部分(黒)とレバーの仕切り(凹)部分が正しくセットされている状態です。




レバーを握ってキャッチャーがスムーズに開閉するか動作確認をしてください。キャッチャーがスムーズに開閉すれば組み立ては完了です。

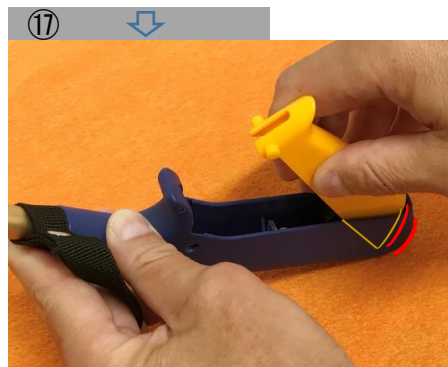

⑯の状態のまま、レバーの丸い部分とグリップの丸い部分が重なるように置きます。



シリコンスプレーをキャッチャー中央部に塗布すれば、よりキャッチャーの動きが良くなります。スプレーのかけ過ぎに気をつけてください。

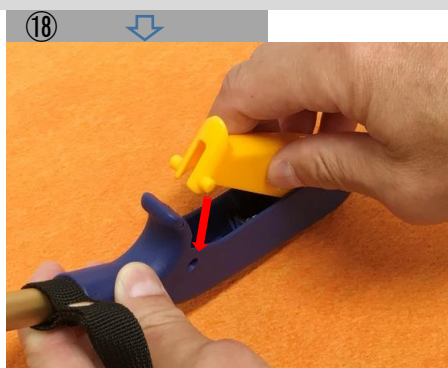

⑰の状態からレバーをグリップの方に倒していきながら、レバー突起部分(凸)とグリップ突起穴(凹)に近づけます。

【ご注意ください】

作業中は、特にバネ、ピンの紛失に十分気をつけながら組み立ててください。



株式会社 インタージェット AIJ福祉事業部
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-7-38

TEL: 06-6393-3622 FAX: 06-6393-3822

Mail: aij@aij-osaka.com <http://www.aij-osaka.com/>