


■特徴


- 全長55cm～70cmの間で、お好みの長さに調節できます。
- はさみ部分は90° ずつ4方向に向きを変えられ、手首をひねらずに物をつかめます。

■使用方法

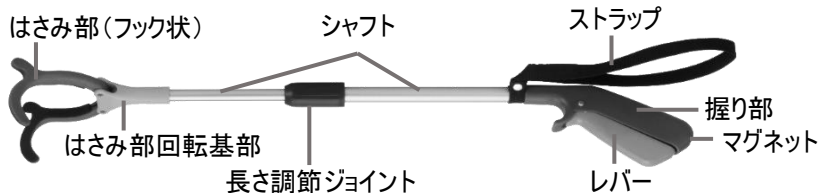

* ご使用になる前に、はさみ部先端の赤キャップを必ず取り外してください。

- レバーを握ると、はさみ部が閉じて物をはさむことができます。
- 握り部端のマグネットで、クリップなどの鉄製小物などを拾えます。
- ストラップを手首に通すことで、本体の落下を防止します。

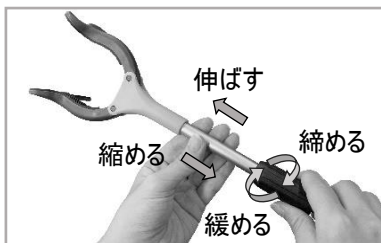

●長さ調節ジョイントで長さを調節、固定する。
長さ調節ジョイントを時計方向に回すと緩み、お好みの長さに調節できます。反時計方向に回すと締め、長さを固定することができます。物を持ち上げても勝手に長さが変わらないように固定します。シャフトの伸縮操作はゆっくりと行ってください。(内部破損の原因となります。)



●はさみ部を回転させる。
長さを固定した後、長さ調節ジョイントをつかみ、はさみ部回転基部を引っ張ります。引っ張った状態で、はさみ部の向きを変えます。(回転基部を引っ張らずに無理に向きを変えると破損する原因となります。)90° ずつ4方向に向きを変えることができます。

■使用上の注意

❗必ず守る

- 本品は杖ではありません。体重をかけた使い方はおやめください。
- 必ず回転式ジョイントを締め、シャフトの長さを固定してからご使用ください。
- はさみ部を回転させる際、必ず回転基部を引っ張った状態で向きを変えてください。(引っ張らずに無理に回転させると破損する原因となります。)
- 重量が1kg以上の物は持ち上げないでください。
- 高温なものへは使用しないでください。
- 火器、熱源のそばに近づけないでください。
- 本品を分解・改造しないでください。
- 水中で使用しないでください。
- 本品でふざけあつたり、遊び道具として使用しないでください。
- 汚れの除去は中性洗剤をご使用ください。
- お手入れは濡れタオルで拭き、乾いたタオル等で水分を拭き取ってください。
- * 上記を必ずお守りください。ケガ又は本品の破損の原因となります。

■仕様

寸法 全長550mm～700mm (無段階 長さ調節)
重量 200g
材質 シャフト部:アルミニウム
はさみ部・握り部・レバー:PA(ポリアミド樹脂)
長さ調節ジョイント:ナイロン



■お問合せ

製品に異常、故障等ありましたら使用を中止し、販売店、下記までお問い合わせください。製品に関するご質問、お問合せ等は、下記までご相談ください。

発売元

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-7-38
株式会社 インタージェット AIJ福祉事業部
TEL: 06-6393-3622 FAX: 06-6393-3822

